


SARS-CoV-2 Antigen hurtigtest

(Colloidal Gold Immunochromatography)




- Ikke-invasiv
- Enkel å bruke
- Praktisk - bruker ikke annet utstyr
- Hurtig - testresultat etter 15 min.
- Stabil - høy nøyaktighet
- Rimelig og kostnadseffektiv


Brukerveiledning

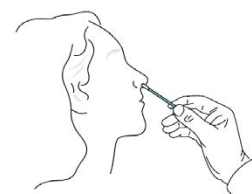


Steg 1: Ta prøven med bomullspinnen.

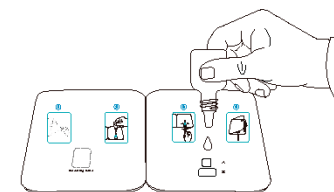

Steg 2: Drypp 5 dråper buffer i fordykning A.

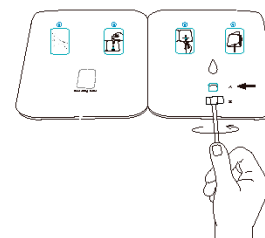

Steg 3: Før inn prøven gjennom fordykning B til fordykning A. Rotér pinnen først mot høyre så mot venstre, minst to ganger hver vei.

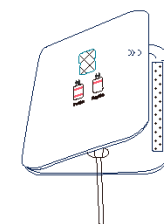

Steg 4: Fjern beskyttelsespapiret, brett den venstre delen over den høyre og vent i 15 min.

Tolking av resultatet

Positiv

(+)




Negativ

(-)



Ugyldig

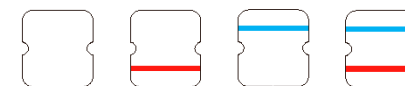

Sykehus



Teststasjon



Flyplass



Holdeplass



Hotell



Arbeidsplass



Massetesting