



# Antibac®

## Overflatedesinfeksjon

### 75% servietter og kluter

#### Desinfeksjonsservietter for overflater



Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % kluter og servietter har dokumentert effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp, og brukes på overflater som tåler alkohol. Væsken gir ikke resistente bakterier og etterlater ingen stoffer på flaten etter fordamping. Virketid: minst 1 minutt.

Produktet leveres i ulike forpakninger og størrelser, se tabell under.

#### Bruksområde

Klutene og serviettene er utviklet for desinfisering av overflater, inventar og lignende innen blant annet innen helse, tannhelse, næringsmiddelindustri, storhusholdning, barnehage, skole og kontor. Kluter og servietter egner seg godt til desinfisering av blant annet kontaktpunkter, benker, bord, produksjonsutstyr og redskaper.

#### Produktegenskaper

Virketid: minst 1 minutt.

Kluter i spann måler 22 x 22 cm. Dekker inntil 5 m<sup>2</sup>. Klutene dras enkelt ut gjennom lokket og rives av. Lokket tetter godt og sørger for at klutene bevarer fuktigheten. Mål på spann: Høyde 25,8 cm, diameter 28,5 cm. Vekt: 4 kg. Væskemengde: 3100 ml.

Store desinfeksjonskluter i flowpack måler 24 x 35 cm. Dekker inntil 10 m<sup>2</sup>.

Servietter i boks måler 20 x 20 cm. Dekker inntil 1/2 m<sup>2</sup>.

Enkeltpakkede servietter måler 17 x 22 cm. Leveres i praktisk og betjeningsvennlig displaykartong.

Testdokumentasjon 2021: Testdokumentasjon: EN13727 bacteria, EN13697: bacteria, yeast & fungi, EN14348: mycobacteria, EN13624: yeast & fungi, EN14476: Adenovirus, Murine Norovirus.

#### Bruksanvisning

Gni kluten/servietten over flaten slik at den er fuktig i minimum 1 minutt. Der fordamping skjer raskere, må prosedyren gjentas. Produktene brukes på alkoholbestandige overflater som er tørre og ikke synlig skitne.

#### Innhold

Aktive stoffer		Effekt
Denaturert etanol	75%	Biocide
Isopropylalkohol		Biocide

**Oppbevaring**

Uåpnet: 3 års holdbarhet fra produksjonsdato. Åpnet: 3 mnd  
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

**Forpakningsstørrelse Salgsenhet / Artikel nr.****Artikkel nr.****GTIN****GTIN (salgsenhet)****Type forpakning**

1 x 1 stk

603047

7054951130470

7054951130470

Spann

2 x 1 stk

603050

7054956030508

7054957030507

Refill

6 x 1 stk

601150

7054956011507

7054957011506

Boks

6 x 1 stk

603011

7054956030119

7054957030118

Displaykartong

12 x 12 stk

601672

7054956016724

7054958016722

Flowpack

6 x 70 stk

601192

7054955011928

7054954011929

Boks

**Tilleggsinformasjon**

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside [www.kiilto.no](http://www.kiilto.no), eller send en epost til vår kundeservice [post.no@kiilto.com](mailto:post.no@kiilto.com).